




Emergency Bandage™ Anwendung Handamputation

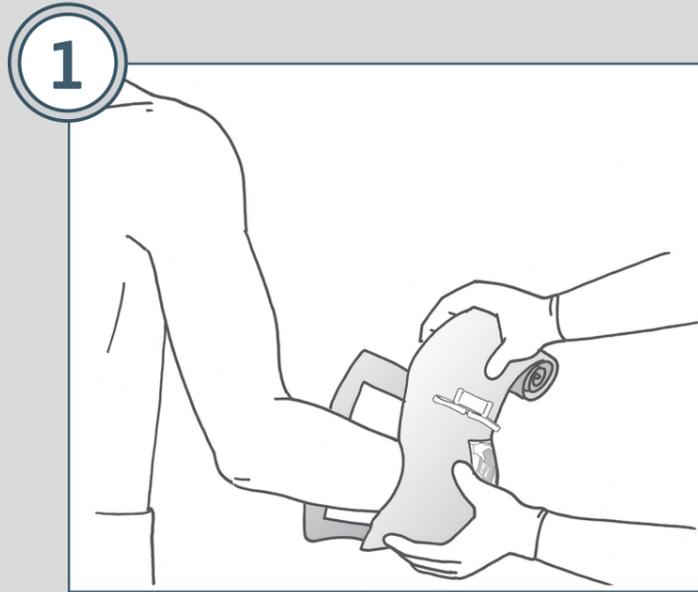


Platzieren Sie die Wundauflage mittig auf dem Stumpf.

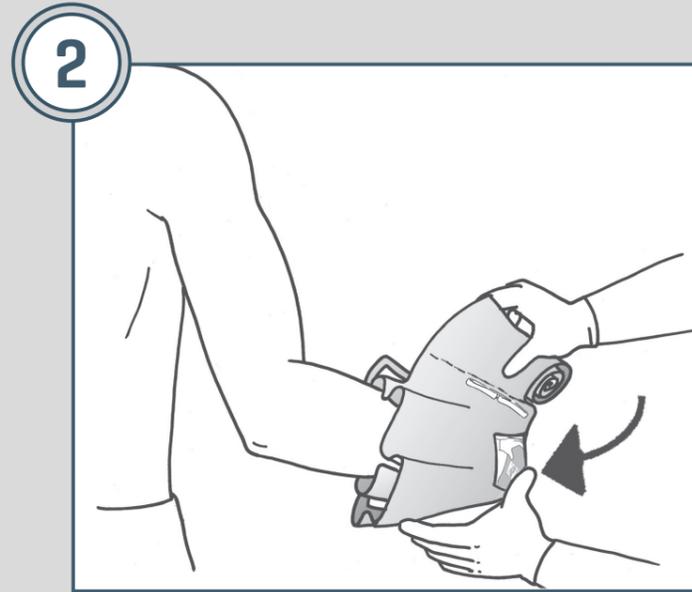


Umhüllen Sie den Stumpf mit der Wundauflage.

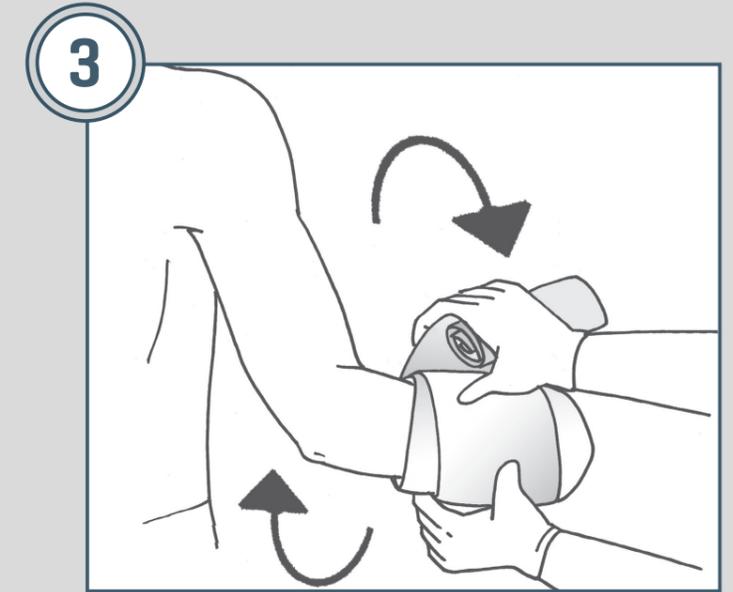


Wickeln Sie die Bandage um alle Kanten der Wundauflage.

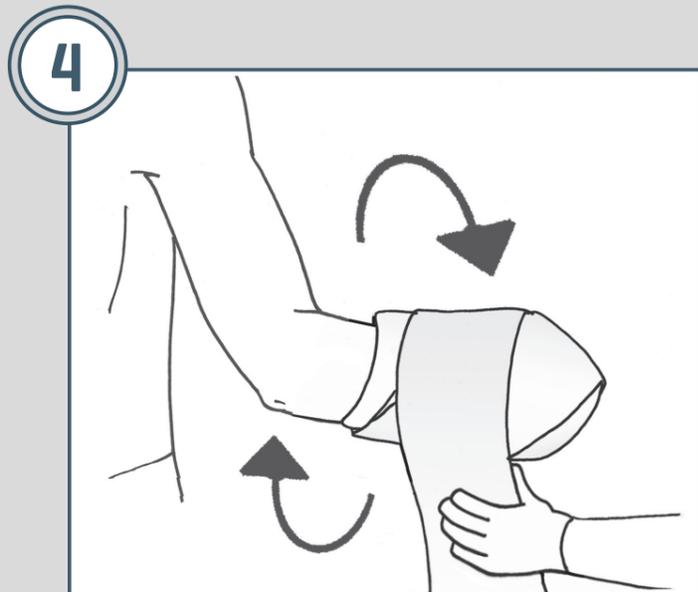

Lassen Sie nun 2-3 Umwicklungen übrig.

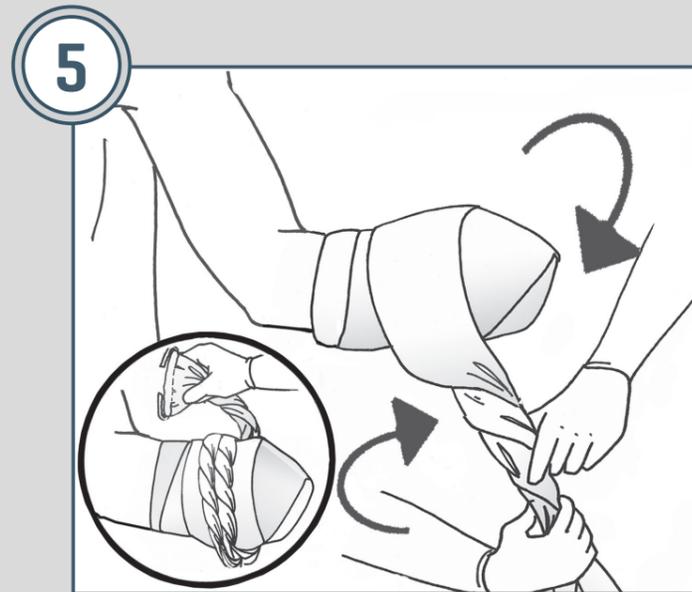

Verdrehen Sie die Bandage in sich und wickeln Sie die Bandage fest über den Druckbügel.

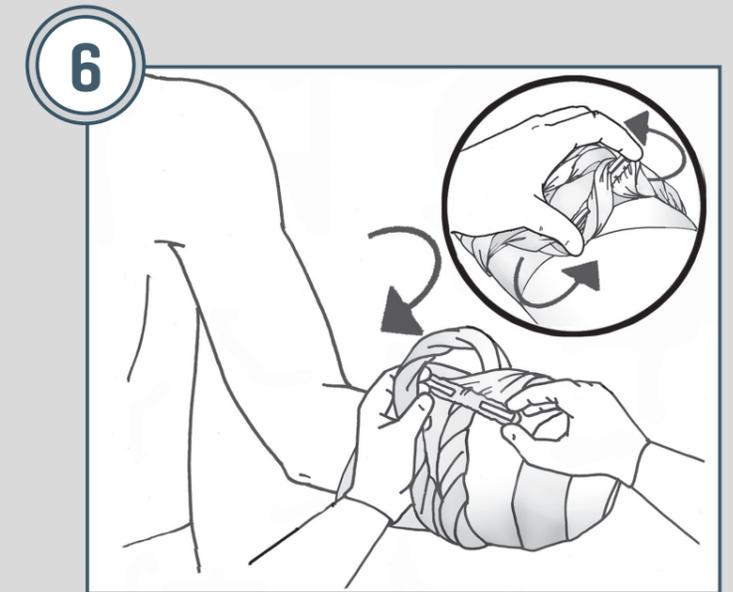

Platzieren Sie die Befestigungsklammer unter einem „Wickelgang“ und drehen Sie die Klammer ähnlich einem Tourniquet. Zum Schluss sichern Sie die Befestigungsklammer an der Bandage.